



Mini Steriliserings-tabletter, 10 stk.



Brugsanvisning

- 1) Rengør menstruationskoppen som du plejer.
- 2) Opløs 1 Milton mini tablet i 1½ - 2 dl koldt vand.
- 3) Læg menstruationskoppen ned i opløsningen med åbningen opad.
- 4) Lad opløsningen virke i 15 minutter.
- 5) Menstruationskoppen er nu steriliseret og klar til opbevaring. Det anbefales at skylle menstruationskoppen inden næste brug.

Tip: Milton kan i nogen grad reducere lugtgener fra din menstruationskop. Lad menstruationskoppen ligge i opløsningen 8-12 timer og lad den herefter lufttørre så længe som muligt.

- Steriliserer på 15 min.
- Fjerner 99,9% af bakterier, svampesporer og virus

Aktiv ingrediens: Troclosen-natrium 19,5%. Opbevares tørt og utilgængeligt for børn.

Forebyggende foranstaltninger: Kan forårsage alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da etiketten. Undgå udledning til miljøet.

Advarsel! Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

